

マイドスケールご利用開始準備ガイド

(脈波測定器あり)

株式会社Yume Cloud Japan



1. アカウントの作成

※既に登録された方は②の「アカウントをお持ちの方はこちらから」をクリックしてください





1. アカウントの作成





1. アカウントの作成



※基本情報を変更する場合

アカウント情報	×
アカウント情報の変更	
メールアドレス yumecloud.1808@gmail.com	
基本情報 夢 梅子	>
パスワード *******	>
2段階認証 無効	>
Fitbitとの接続 未接続	>
お問い合わせ・サポート	
お問い合わせ	>
サポートページ	>
その他	
ストレステスト	>
ビデオチャットに接続する	>
ユーザーIDを表示	>
ログアウト	

※基本情報を変更したい場合は、Homeヘログイン後 右上の人マークをタップするとアカウント情報ページが開きます。

ここでパスワードの変更やお問い合わせを行うことができます。

※特に指示がある場合のみ、下記ご利用可能となります。 ・2段階認証 ・ストレステスト

※ビデオチャットへの接続もこちらから行うことができます。



2. 脈波測定アプリのインストール (iPhone)



①インストール

先にスマートフォンの設 定でBluetoothをオンにし、 左のURL、QRコードからア プリをインストール

※QRコードからのアクセ スについて

iPhoneの標準のカメラア プリを用いてください。



②起動と初期設定

ホーム画面のMind Scaleを 起動し、画面左上の「E」 をタップ

上段にサインアップで登録したログインIDを、下段に脈波センサーIDを登録

※センサーIDは脈波セン サーの起動画面で確認で きます。脈波センサーの スイッチ(M5ボタンの左 側面突起)を押して起動 してください。

入力が終わりましたら 『決定』を押し、アプリ を閉じて再起動してくだ さい。



2. 脈波測定アプリのインストール (Android)



レンズまたは標準でない カメラアプリを用いてく ださい。



②起動と初期設定

ホーム画面のMind Scaleを 起動し、画面左上の「<u></u>]

サインアップで登録した ログインIDを、次に脈波セ ンサーIDを登録してくださ

*センサーIDは脈波セン サーの起動画面で確認で きます。脈波センサーの スイッチ(M5ボタンの左 側面突起)を押して起動 してください。

入力が終わりましたら、 アプリを閉じて再起動 してください。



脈波計測センサーのご説明





A ---- M5ボタン

電源が入っている状態でクリックするとリセットされます。 電源が入っている状態で2秒間長押しすると電源が切れます。 測定しない状態で1分間放置すると自動的に電源が切れます。

B --- 電源スイッチ

電源が入っていない状態で押すと電源が入ります。 電源が入っている状態で6秒間長押しすると電源が切れます。

C --- バッテリー残量

バッテリーの残量表示です。30%以下の場合早めに充電してください。

D --- 測定値

この測定値が表示されない場合は指の置き方に問題があります。 センサーの上に正確にそっと触れるように置いてください。

センサーの仕様

満充電からの連続使用可能時間 --- 約1時間10分 (1日1回測定で約2週間使用可) 満充電までにかかる時間 --- 約50分





Webサポートページからご確認いただけます。

https://support.yume-cloud.com/



ヘルプデスク

メールでのお問い合わせ

helpdesk@yume-cloud.co.jp

営業日24時間以内に返信いたします。